

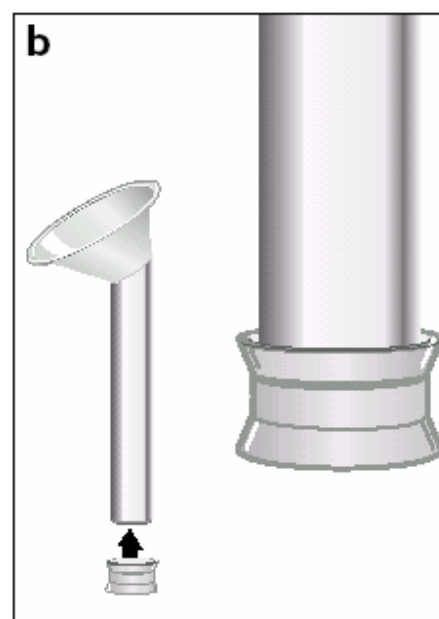
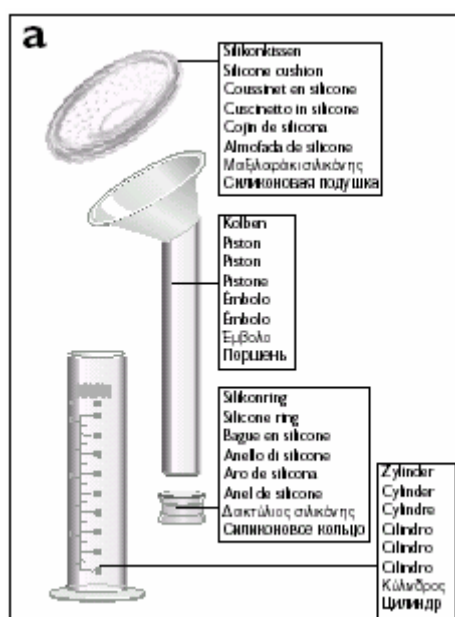


Ręczny odciągacz pokarmu NUK Soft & Easy Instrukcja użytkowania

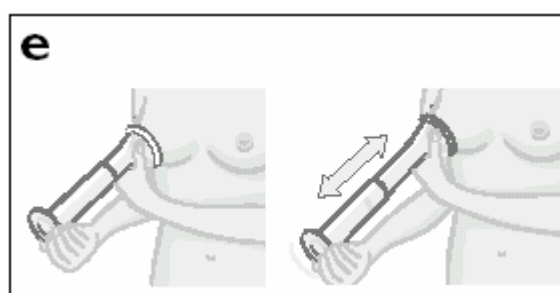

Rys. a:
Części składowe:
Silikonowa wkładka
Tłok
Silikonowa uszczelka
Cylinder

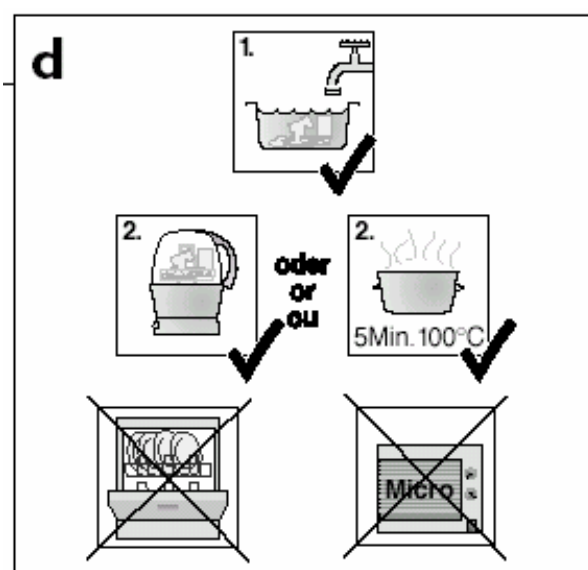

Droga Mamo,

Dla niemowląt mleko matki jest najważniejszym źródłem pożywienia. Z tego powodu NUK wspiera Matki serią produktów wspomagających karmienie piersią, zawierającą praktyczne i wygodne pomoce przydatne w każdej sytuacji w czasie karmienia, tak aby Matka i Dziecko mogli cieszyć się każdą bezcenną chwilą spędzoną razem. Ten praktyczny odciągacz zaprojektowano z myślą o tym, aby pomóc Matce i Dziecku wtedy, kiedy naturalne karmienie nie jest możliwe.

Już od 50 lat NUK troszczy się o dzieci na całym świecie. Od pokoleń NUK jest marką, której ufają rodzice. Zaufanie to jest codziennie wzmacniane dzięki temu, że produkty NUK są codziennie używane w szpitalach w Niemczech i na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności, jaki codziennie bierzemy na swoje barki i dlatego staramy się stosować najlepsze materiały oraz stale ściśle kontrolować produkcję.

1. Przed pierwszym użyciem

Umyj i wysterylizuj wszystkie elementy (patrz rys. a) przed pierwszym użyciem odciągacza pokarmu NUK (patrz punkt 4. Czyszczenie i sterylizacja (rys. d)).

2. Opis urządzenia

2.1. Przeznaczenie odciągacza

Ręczny odciągacz pokarmu NUK jest pomocny w odciąganiu mleka matki do pojemnika. Jest szczególnie przydatny do odciągania niewielkich ilości pokarmu, kiedy piersi są przepełnione lub w przypadku zastoju pokarmu. Ponadto ręczny odciągacz NUK można zastosować w przypadku wklęsłych brodawek sutkowych przed przystąpieniem do karmienia.

Dzięki powstającej próżni brodawki lekko się wyciągają.

2.2. Zalety

Ręczny odciągacz pokarmu NUK ma następujące zalety:

- Łatwo go można umyć, dzięki temu że jest prosty w demontażu.
- Silikonowa wkładka z masującymi wypustkami sprawia, że laktator jest wygodny w użyciu i delikatny.
- Naśladuje naturalny proces ssania przez dziecko.
- Szeroka podstawa zapewnia stabilność.

2.3. Przeciwwskazania

Jeżeli piersi są obolałe, zaczerwienione lub występuje zapalenie piersi, ręcznego odciągacza pokarmu nie powinno się używać, chyba że ze szczególną ostrożnością. W każdym przypadku przed użyciem odciągacza należy zasięgnąć porady lekarza.

2.4. Bezpieczeństwo

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem odciągacza. Stanowi ona niezbędne wyposażenie laktatora i powinna być zawsze pod ręką.
- Jeżeli pokarm przeznaczony jest dla wcześniaka, należy przestrzegać zaleceń lekarza.
- Należy przestrzegać wskazówek w punkcie 4. Czyszczenie i sterylizacja, aby zapobiec rozwojowi bakterii i powstaniu infekcji, a także uszkodzeniu odciągacza.
- Odciągacz należy umyć i wysterylizować przed każdym użyciem.
- Jeżeli części odciągacza zostaną uszkodzone, np. zarysowane od wewnątrz, nie należy go dłużej używać dla zachowania higieny.
- Ręcznego odciągacza pokarmu należy używać tylko w celu, do jakiego jest przeznaczony.

- Aby odciągacz działał prawidłowo, należy używać tylko oryginalnych akcesoriów NUK.
- W przypadku używania akcesoriów niepolecanych przez producenta lub wykorzystywania nieoryginalnych części do naprawy, gwarancja traci ważność. Dotyczy to również napraw wykonywanych przez niewykwalifikowane osoby.

3. Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Ręcznego odciągacza pokarmu NUK można używać tylko wtedy, gdy jest czysty (patrz punkt 4. Czyszczenie i sterylizacja (rys. d)).
2. Dokładnie umyć ręce przed każdym użyciem odciągacza.
3. Nałożyć silikonową uszczelkę na koniec tłoka (rys. b) i docisnąć dłonią tak, aby znalazła się we wgłębieniu na końcu tłoka i nie wystawała. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby uszczelka umieszczona była w dobrą stronę, inaczej nie będzie się trzymała na tłoku.
4. Zwilżyć uszczelkę pokarmem. Dzięki temu tłok będzie się poruszał lekko, a odciąganie będzie łatwiejsze.
5. Ostrożnie włożyć tłok do cylindra z podziałką (rys. c).
6. Nałożyć silikonową wkładkę na lejek (rys. c).
7. Przyłożyć lejek do piersi, tak aby brodawka sutkowa znajdowała się po środku.
8. Jedną ręką przyciskać lejek mocno do piersi, a drugą ręką zacząć odciąganie, poruszając cylindrem w przód i w tył (rys. e).
9. Kiedy mleko zacznie wypływać, można zwolnić ruchy pompujące.
10. Kiedy obie piersi opróżnią się całkowicie, pokarm można przechowywać w odpowiednim pojemniku w lodówce bądź można go zamrozić, gdy chce się go

przechowywać dłużej (patrz punkt 5. Przechowywanie pokarmu).

11. Wszystkie **osobne części** odciągacza należy dokładnie umyć wodą natychmiast **po każdym użyciu** i wysterylizować przed każdym użyciem.

4. Czyszczenie i sterylizacja

(patrz rys. d)

W czasie obchodzenia się z pokarmem kobiecym szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad higieny oraz utrzymywanie w czystości szczególnie tych części odciągacza, z którymi ma kontakt mleko. Odciągacz należy zawsze przechowywać w czystych, higienicznych warunkach, aby chronić dziecko przed infekcją.

Należy pilnować, aby w odciągaczu nie pozostawały resztki mleka, ponieważ mogą się w nich rozwijać bakterie. Osady z mleka mogą również prowadzić do uszkodzenia materiału.

Dlatego też odciągacza można używać tylko wtedy, gdy jest czysty i wysterylizowany.

4.1. Czyszczenie

1. Umyj wszystkie części laktatora w zlewie, używając płynu do mycia naczyń. **UWAGA!** Części laktatora nie należy nigdy myć w zmywarce do naczyń, ponieważ detergenty mogą uszkodzić materiały, z których są wykonane.

4.2. Sterylizacja

Części odciągacza należy wysterylizować przed każdym użyciem w następujący sposób:

- w sterylizatorze parowym NUK lub
- wygotowując je przez 5 minut (zawsze należy sprawdzić, czy w garnku znajduje się wystarczająca ilość wody)

UWAGA!

Części odciągacza nie należy nigdy sterylizować w urządzeniu wykorzystującym mikrofalę ani za pomocą preparatów do zimnej sterylizacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiałów, z których są wykonane.

Ważne!

Po sterylizacji należy poczekać przed ponownym użyciem odciągacza, aż wszystkie części ostygną.

5. Przechowywanie pokarmu

Jeżeli odciągnięty pokarm nie będzie od razu wykorzystany, należy go przelać do odpowiedniego pojemnika, zamknąć i przechowywać w lodówce.

Jeżeli pokarm ma być przechowywany dłużej niż 48 godzin, powinien zostać natychmiast zamrożony w odpowiednim czystym i higienicznym pojemniku, np. w pojemniku NUK na mleko matki.

Maksymalny okres przechowywania wynosi 2 tygodnie w zamrażalniku lub 6 miesięcy w zamrażarce (-18°C).

Mleko można odmrozić, umieszczając pojemnik w lodówce bądź, jeśli jest potrzebne szybko, w ciepłej wodzie.

Odciągniętego pokarmu nie należy odmrażać w kuchence mikrofalowej ani w gorącej wodzie, ponieważ powoduje to niszczenie cennych składników odżywczych, jak również może prowadzić do uszkodzenia materiału, z którego wykonany jest pojemnikiem. Przed karmieniem należy dobrze wstrząsnąć pojemnik, aby oddzielony tłuszcz dobrze wymieszał się z mlekiem.

Dokładniejsze informacje dotyczące przechowywania pokarmu przez dłuższy czas można uzyskać u położnej, lekarza, farmaceuty lub w poradniach laktacyjnych.

6. Dane techniczne

Zakres temperatur:

- eksploatacja od +4°C do +40°C
- przechowywanie od +4°C do +40°C
- sterylizacja do 100°C

Wyrób medyczny klasy I zgodny z unijną dyrektywą 93/42/EEC.

7. Utylizacja

Jeżeli odciągacz jest już nieprzydatny, należy zutylizować poszczególne części zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

8. Gwarancja

Pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się z urządzeniem i przestrzegania instrukcji użytkownika producent udziela 24-miesięcznej gwarancji, licząc od momentu nabycia urządzenia.

Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia w przypadku wykrycia wad materiałowych lub konstrukcyjnych po przesłaniu go opłaconą przesyłką. W innym przypadku obowiązują odpowiednie przepisy prawne.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego używania urządzenia. W ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu producent uwzględnia uzasadnione reklamacje i zobowiązuje się do usunięcia usterek bez dodatkowych opłat.

Urządzenie należy odesłać wraz z wypełnioną niniejszą kartą gwarancyjną lub innym dokumentem potwierdzającym datę zakupu.

W przypadku braku dowodu zakupu producent automatycznie wystawi rachunek za naprawę, a urządzenie zostanie odesłane za zaliczeniem pocztowym.

Karta gwarancyjna powinna zostać wypełniona w chwili zakupu i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu zagubionej karty gwarancyjnej.

Na wypadek reklamacji należy zachować numer artykułu i adres dystrybutora.

art. nr: 10.252.068

Dystrybutor w Polsce:

BABY LAND Dariusz Staniszewski

al. Stanów Zjednoczonych 67/D7

04-028 Warszawa

tel.: (22) 810 30 54

tel.:(22) 773 36 76 (78, 79, 81)

fax.: (22) 810 41 15.

www.nuk.pl

Karta gwarancyjna:**Model:****Pieczętka sprzedawcy:****Data zakupu:****Kupujący:**