

# Smoczki specjalistyczne Nuk dla dzieci z rozszczepem wargi lub podniebienia

Dla noworodków z rozszczepem wargi, dziąsła lub podniebienia przyjmowanie pokarmu wiąże się ze znaczącymi problemami. W większości przypadków wynika to z nieumiejętności wytworzenia przez dzieci podciśnienia wewnątrz jamy ustnej, co uniemożliwia prawidłowe ssanie.

Uwzględniając specjalne warunki anatomiczno-morfologiczne okolic podniebienia i dziąsła u dzieci cierpiących z powodu wad rozszczepowych, NUK opracował dla nich specjalne smoczki do butelek. Mogą one być używane również w okresie przygotowania do operacji rozszczepu.

Jeśli chodzi o materiał, z jakiego produkowane są smoczki specjalistyczne, ze względu na swoją miękkość i elastyczność najlepiej sprawdza się naturalny lateks. Smoczki te pasują do wszystkich butelek standardowych marki Nuk.

---

## Smoczek NUK na rozszczep podniebienia (bez otworu przepływowego)

Smoczek do butelki dla dzieci z otwartym rozszczepem podniebienia. Wygięta górna część smoczka zamyka rozszczep w podniebieniu, co uniemożliwia dostanie się pokarmu do dróg oddechowych. Jednocześnie pokarm miesza się ze śliną, co jest ważne dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia. Otwór w smoczku musi być wykonany indywidualnie w zależności od miejsca występowania rozszczepu i ściśle według wskazań lekarza.

art. nr: 107.001

---

## Smoczek NUK na rozszczep wargi (średni otwór przepływowy)

Smoczek do butelki dla dzieci z zaszytym rozszczepem podniebienia i z jednostronnym rozszczepem wargi lub, w niektórych wyjątkowych przypadkach, dla dzieci z rozszczepem obustronnym. Smoczek ten zakrywa rozszczep w wardze oraz stymuluje naturalne odruchy pobierania pokarmu – ssania i żucia – co umożliwi dziecku prawie całkiem normalne ssanie. Używanie smoczków NUK na rozszczep wargi powoduje znaczne zmniejszenie występowania takich częstych objawów jak zakrzuszenia, odbijanie się czy nawet wymioty. Używanie ich nie stwarza żadnego zagrożenia nawet w okresie przygotowania do operacji rozszczepu.

art. nr: 107.003

NUK is a registered trademark of MAPA GmbH/Germany

Dystrybutor w Polsce: **BABY LAND** Dariusz Staniszewski  
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa  
Biuro: ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła  
tel.: 22 773 36 76 (78,79,81), faks: 22 773 80 46

Polub nas na [www.facebook.com/NUK.Polska](https://www.facebook.com/NUK.Polska)

[www.nuk.com](http://www.nuk.com)

**NUK**<sup>®</sup> **MEDIC**  
**PRO**  
SEIT 1956 EST. CLINICAL SUPPORT

# Terapeutyczny smoczek treningowy Nuk - do ćwiczeń terapeutycznych

## Produkt medyczny



W przeciwieństwie do innych smoczków uspokajających terapeutyczny smoczek treningowy NUK jest produktem medycznym. Jako przyrząd medyczny przyczynia się on w znacznym stopniu do wzmocnienia mechanizmu ssania oraz wyeliminowania nieprawidłowości w obrębie motoryki narządów jamy ustnej (takich jak oddychanie przez usta, zaburzenia ssania, żucia, polykania czy mowy lub problemy z mimiką twarzy). Główny nacisk położony jest na leczenie zaburzeń polykania, związanych z nieprawidłowymi ruchami języka oraz regulowanie skomplikowanych procesów ssania i polykania. Ponadto używanie terapeutycznego smoczka treningowego może mieć pozytywny wpływ na regulację napięcia mięśniowego oraz harmonizację mięśni okołoustnych oraz wewnątrz jamy ustnej. Pomaga skutecznie pozbyć się nawet tak uporczywych nawyków jak zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów i języka, którym towarzyszy ból oraz chrzęczenie stawów szczęki. Używanie terapeutycznego smoczka treningowego jest ważne i korzystne w terapii oddychania, głosu i mowy z uwagi na ogromne znaczenie aktywacji ruchowo-sensorycznej oraz trening odruchów ssania i polykania.

### Dostępny w dwóch rozmiarach

Terapeutyczny smoczek treningowy jest dostępny w dwóch rozmiarach: S – dla dzieci w wieku szkolnym oraz L – dla dorosłych. Może być używany w terapii mowy, w praktyce ortodontycznej i fizjoterapeutycznej, w mioterapeutycznych ćwiczeniach według metody Padovan.

W tego rodzaju terapii terapeutyczny smoczek treningowy NUK jest często używany w połączeniu z cienkim cewnikiem, aby umożliwić pacjentowi pobieranie niewielkich ilości wody w trakcie ćwiczeń ssania/polykania. Potrzebne do tego celu perforacje można wykonać indywidualnie za pomocą ogólnie dostępnych wiertel do metalu HSS (max. 3 mm), które można kupić w specjalistycznych sklepach z urządzeniami budowlanymi.

---

### Terapeutyczny smoczek treningowy NUK – rozmiar S (dla dzieci w wieku szkolnym)

art. nr: 107.020

---

### Terapeutyczny smoczek treningowy NUK – rozmiar L (dla dorosłych)

art. nr: 107.021

[www.nuk.com](http://www.nuk.com)

Polub nas na [www.facebook.com/NUK.Polska](https://www.facebook.com/NUK.Polska)

NUK is a registered trademark of MAPA GmbH/Germany

**NUK**<sup>®</sup> **MEDIC**  
**PRO**  
SEIT 1956 EST. CLINICAL SUPPORT